

Abnahme und Versand von Abstrichmaterial/Sekretstatus Frau

Gonokokkenkultur, Bakterienkulturen, Mykoplasmenkultur, Pilznachweis

Allgemeine Hinweise:


Abnahmebesteck und Transportmedien werden zur Verfügung gestellt
Zuweisungsformular ausfüllen:

- komplette Daten der Patientin
 - Diagnose angeben
 - gewünschte Untersuchung anführen
- Patientenname auf Abnahmeröhrchen vermerken

Probenabnahme:

Eine Packung steriler Holzstiel tupfer (à 2 Stück) ist für die Gramfärbung und Port-A-Cul™ ausreichend.

Gramfärbung (Punkt 1 des Untersuchungsprogramms): **Objektträger (OT)**

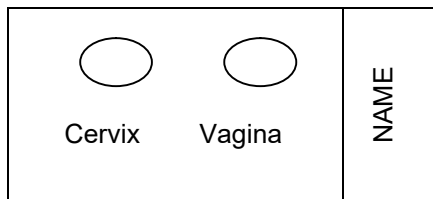

- Patientenname auf OT
- am OT Cervix (c) und Vagina (v) beschriften
- mit Tupfer rund ausstreichen (siehe Skizze)
- Transport in entsprechendem Kunststoffetui

Untersuchungsprogramm Sekret komplett:

1. Gram-Färbung
2. Neisseria gonorrhoeae (PCR)
3. Chlamydia trachomatis (PCR)
4. Mycoplasma genitalium (PCR)
5. Trichomonas vaginalis (PCR)
6. **Gonokokkenkultur + Empf.**
7. **Bakterienkulturen aerob/anaerob + Empf.**
8. **Mykoplasmenkultur (M. hominis, U. urealyticum)**
9. **Pilznachweis nativ und Kultur**

Bakterienkulturen (Punkte 6-9 des Untersuchungsprogramms):

- **Port-A-Cul™-Transportmedium**

den Cervixtupfer nach Ausstreichen auf dem OT in das Transportmedium geben und **lang** abbrechen

den Vaginaltupfer nach Ausstreichen auf dem OT **kurz** abbrechen und in dasselbe Transportmedium geben

oder

- **Transwab®-Medium**

für jede Abnahmelokalisation ein Transwab®-Besteck (Röhrchen und Tupfer) verwenden

Lagerung und Transport:

- Lagerung der unbeimpften und beimpften Röhrchen bei Raumtemperatur bis zum Abtransport
- Beimpfte **Objektträger** können ohne weitere Vorkehrungen per Bote oder Post versandt werden.
- Transwab® und Port-A-Cul™ sollten idealerweise innerhalb weniger, maximal jedoch 48 Stunden im Labor einlangen.
- Versand von beimpften **Port-A-Cul™** oder **Transwab®-Medien** in einem staubdichten Kunststofftasch mittels Polsterkuvert o.ä. mit entsprechender Gefahrgutkennzeichnung (gemäß ADR 2005).
- Nähere Hinweise zu Verpackung und Beförderung diagnostischer Proben: www.pilzambulatorium.at unter „Arztbereich“ – „Verpackung und Versand“

Für die PCR-Diagnostik (Punkte 2-5 des Untersuchungsprogramms) werden spezielle Abnahmebestecke und Transportmedien benötigt, die wir gerne zur Verfügung stellen.

Die entsprechenden Abnahmeanleitungen zur PCR-Diagnostik stehen als Downloads im Arztbereich unserer Homepage www.pilzambulatorium.at zur Verfügung.