

HPV-Nachweis mittels Digene™ Hybrid Capture Test

Abnahme und Versand von Abstrichmaterial

Allgemeine Hinweise:

Abnahmebesteck und Transportmedien werden zur Verfügung gestellt

Zuweisungsformular ausfüllen:

- komplette Daten des Patienten
- Diagnose angeben
- gewünschte Untersuchung anführen

Patientenname auf Abnehmeröhrchen vermerken

Probenabnahme:


Frau (Cervix) :

- 1) Überschüssigen Cervikalschleim mit einem Wattestieltpuffer vom Muttermund und der umgebenden Ektocervix entfernen. Tuffer verwerfen.
- 2) Das beigepackte Bürstchen etwa 1 – 1,5 cm in den Muttermund einführen, bis die größten äußeren Borsten des Bürstchens die Ektocervix berühren.

Das Bürstchen darf nicht vollständig in den Cervikalkanal eingeführt werden.

- 3) Bürstchen dreimal vollständig im Gegenuhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).
- 4) Bürstchen bis auf den Boden des Transportröhrchens einführen, Stiel an der Bruchlinie abbrechen und das Röhrchen fest verschließen.

**Cervikalbürstchen
verwenden!**

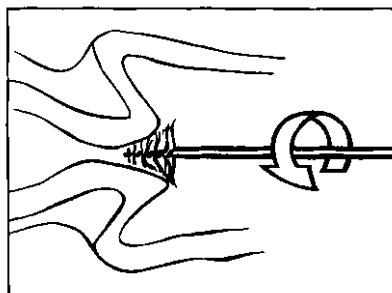

nicht bei schwangeren Frauen

Lagerung und Transport:

Cervixproben können bis zu zwei Wochen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Die beimpften Röhrchen können ohne weitere Vorkehrungen per Bote oder Post versandt werden. Nähere Hinweise zu Verpackung und Beförderung diagnostischer Proben sind auf unserer Homepage www.pilzambulatorium.at unter „Arztbereich“ – „Verpackung und Versand“ zu finden.